

表情を隠さない防曇透明マスク

ルカミイ[®]

'Lookatme'


特許取得商品

【発明の名称】透明マスク



フィルムが曇らない

顔の表情がよくわかる

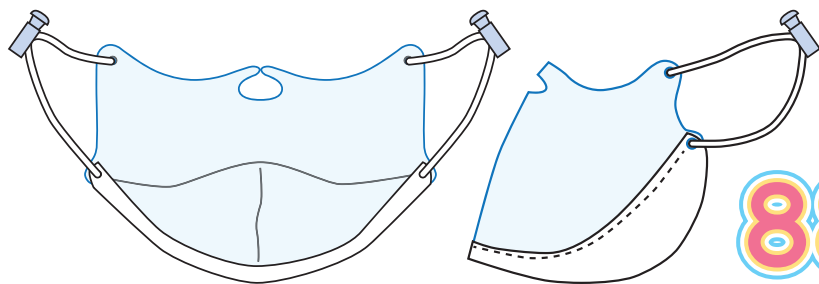

(税込)

880円

ルカミイ (専用ケースセット)

1,100円(税込)



商品のサイズと材質

- ・マスクサイズ: 約17×12cm (フィルム部)
- ・ケースサイズ: 約15×12.5cm
- ・マスク材質: 防曇フィルム、不織布、ゴム
- ・ストッパー材質: プラスチック
- ・ケース材質: 合成皮革

- ◎ルカミイは透明部に特殊な化学的防曇処理をした硬質セルロースフィルムを使用しています。
- ◎防曇スプレーを塗布した一般の防曇フィルムは何回か使用したり拭き取ると防曇性能が落ちてくるのに対し、ルカミイは繰り返し使用しても、拭き取っても高い防曇性能が持続します。
- ◎ルカミイは自然のウェットマスクです。装着中にマスクの内部は湿度が上昇します。この時、薄い水の皮膜の結露が発生して防曇性が現れます。この湿度がウイルスを不活性化します。


ルカミイの紹介動画はこちら▶



ルカミイを装着した時の空気の動きの可視化

矢印が空気の動きです。


秒速 2 m = 大きなため息ぐらいの空気の流れ

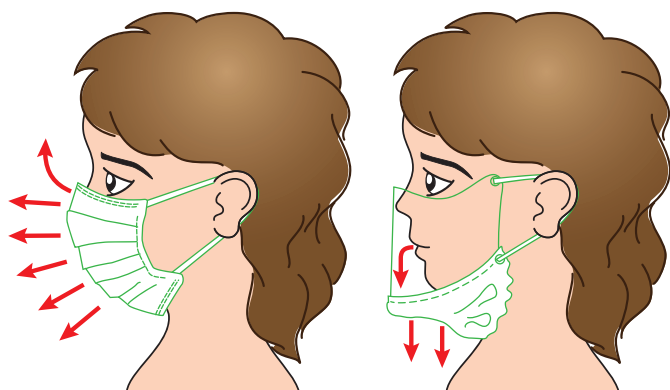

不織布マスク

ルカミイ

秒速 4 m = 咳をしたときの空気の流れ

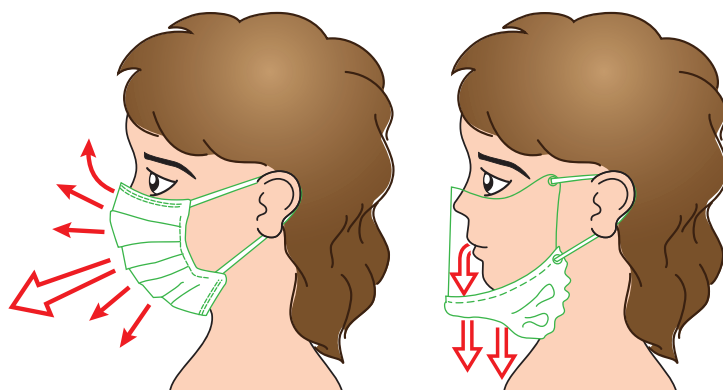

不織布マスク

ルカミイ

ルカミイは、フィルムを使用しているため、空気の流れが前に行かず、フィルムにあたり空気が下へ行きます。対面している相手に、空気をあてない構造になっています。

【光産業創成大学院大学 (静岡県浜松市) にて空気の流れの可視化実験実施】

ルカミイご使用上の注意点

- ルカミイは使用後、洗って頂ければ繰り返しお使い頂けるマスクです。
- 壊れたら新しいマスクに取り替えてください。
- 不織布は手洗い後、十分に乾かしてからお使いください。
- 透明フィルムは中性洗剤を使用しないでください。中性洗剤を使用すると防曇効果が弱くなります。
- 使用を中断または終える際は、手洗いし清潔にしてからケース (別売) に入れて保管してください。
- 強い衝撃を与えないで下さい。破損の原因となります。
- 使用中に皮膚に異常が発生した場合は、すぐにご使用をおやめください。
- 呼吸で透明フィルム内側が濡れることがあります。その場合は乾いた布で優しく拭き取ってください。
- 持ち運びの際はポケットに入れたり、折り曲げたりしないでください。破損の原因になります。
- 持ち運びや保管は専用のケースに入れることをおすすめします。
- 小さなお子様の手が届かない場所で保管してください。
- ご使用中に息のしづらさ、暑さを感じた時は一度外してください。

株式会社 栄商会

静岡県浜松市東区神立町 116-5
 TEL(053)464-0601/FAX(053)464-0616
 URL <https://www.sakae-firm.co.jp>
 E-mail sales@sakae-firm.co.jp
 SHOP <https://www.megane-case.com/>

